



The main advantage of the BENEFIT Screws is that different attachments (abutments, Beneplates etc.) can be interchanged during treatment.

The new counter-rotational clamp prevents accidental loosening of the BENEFIT Screw when abutments are removed.

The clamp holds the implant in position while the internal abutment screw is opened counter-clockwise.

After this the BENEFIT Screw can be equipped for further treatment with new abutments, Beneplates etc. without the need of a new implant insertion.

One Implant – Many Possibilities



33-54555

Counter-Rotational Clamp, 13.5 cm
Konterklemme, 13,5 cm

Benefit Schrauben zeichnen sich dadurch aus, dass verschiedene Aufbauten (Abutments, Beneplates etc.) während der Behandlung befestigt und wieder ausgewechselt werden können.

Die neue Konterklemme verhindert ein versehentliches Lösen der Benefit Schraube beim Entfernen der Abutments.

Die Klemme hält das Implantat in Position während z.B. die interne Schraube des Abutments gegen den Uhrzeigersinn ausgedreht wird.

Dadurch kann die Benefit Schraube für die weitere Behandlung mit neuen Abutments, Beneplates etc. versehen werden, ohne dass eine neue Implantatinsertion notwendig ist.

Ein Implantat – viele Möglichkeiten


BENEFIT. KFO

■ **Counter-Rotational Clamps**
for BENEFIT Screws

Konterklemmen
für BENEFIT Schrauben

Developed in cooperation with:
Entwickelt in Zusammenarbeit mit:

Dr. Benedict Wilmes
Universität Düsseldorf / GERMANY

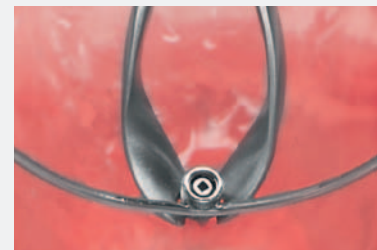

Manufacturer | Hersteller:

psm MEDICAL SOLUTIONS
Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 (74 61) 9 66 37-0
Fax +49 (74 61) 9 66 37-29
E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms